

類別：機械器具54 医療用捲綿子

一般医療機器 一般の名称：医科用捲綿子（JMDNコード：10172000）

メディクスワブ滅菌綿棒 F-RY

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

平和メディク株式会社

TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819

【形状・構造及び原理等】

本品は軸の片辺に繊維を巻きつけた医科用捲綿子である

【材質】・綿体：レーヨン

・軸：プラスチック

【使用目的又は効果】

各種検査の検体採取に使用する

※主に鼻腔、鼻咽頭の検体採取に適しています

【使用方法等】

綿体部分を汚染しないように包装より取り出し、検体を採取する

【使用上の注意】

- 1) 開封後は速やかに使用してください
- 2) 凍結や加熱をしないでください
- 3) 綿棒の軸を折らないようご注意ください
- 4) 検体を直接採取する時は、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう注意してください。小児等では検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に気を付けてください
- 5) 綿体部分に強い力を加えたり、液などに浸したりする場合は、綿体が抜け易くなることがありますのでご注意ください
- 6) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください
- 7) 使用後は速やかに滅菌処理等を行ってから廃棄してください

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光を避けて室温保管すること

有効期間：外箱に記載〔自己認証(当社データ)による〕